

AIRHEEL™ TOIMINNALLINEN ILMATYÖNYYSIDE Tuotekoodi 09A-S, 09A-M ja 09A-L

Valmistuttaja DJO, LLC., USA

AirHeel™ on suunniteltu erityisesti Achilles tendonituksen ja plantaarifaskiitin hoitoon. Tuotteen parantava teho perustuu toisiinsa yhteydessä olevin ilmatyönyihin (jalan alla ja kantapään takana). AirHeel™ saa aikaan pumpppaavan kompression jokaisella askeleella. Tämä vähentää turvotusta ja parantaa verenkiertoa. Tuotteen matalaprofiilisen muotoilun ja keveyden ansiosta se soveltuu käytettäväksi hyvin erilaisessa liikkumisessa.

Kuinka Airheel™ toimii?


Jokaisella askeleella ilma siirtyy jalkapohjan ilmatyönyistä akillesjänteen kohdalla olevaan ilmatyönyyn ja askelten välillä palautuu takaisin jalkapohjan ilmatyönyyn. Ilman siirtyminen työnyistä toiseen saa aikaan pulssimaisen kompression, joka hieroo jalkapohjan kalvojännettä (faskia) ja akillesjänteen (tendon) kohtaa. Kompressio saa näillä kahdella jalan alueella aikaan turvotuksen laskua ja parantaa verenkiertoa.

Airheel™'n ominaisuuksia

- Nopeuttaa paranemista
- Helppo pukea (pujota jalkaan ja kiristä sopivaksi)
- Vähentää turvotusta ja parantaa verenkiertoa
- Mukava käytössä (valmistusmateriaali kevyttä neopreenia)
- Kliinisesti tutkittu tuote
- Airheel™ ei sisällä lateksia.

Indikaatiot

- Achilles tendonituksen hoitoon
- Plantaari faskiitin hoitoon

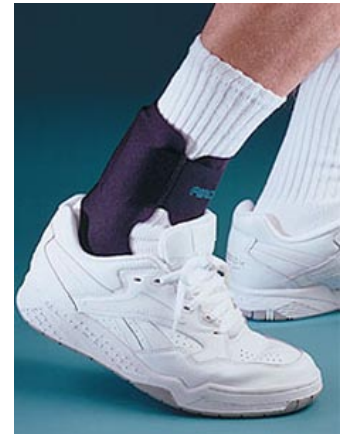

Käyttöohjeet

Pue tukea tarvitsevaan jalkaan sukka. Aseta jalka Airheel™'n sisään varpaat edellä. Aseta kantapää tuen takaosassa olevaan aukkoon. Sijoita akilles-ilmatyöny akillesjänteen kohtaan (hieman kantapään yläpuolelle). Akilles-ilmatyöny on tuessa kiinni tarralla, joten sen korkeutta voidaan tarvittaessa säätää. (Kuva 1)

Aseta jalka lattiaan ja kiinnitä nilkan tarraside. Varmista, että jalkapohjan ilmatyöny on keskellä jalkapohjaa eli jalan pitkittäissuunnassa olevan "holvikaaren" alla. Säädä tuen asentoa/ sijaintia tarvittaessa kiristämällä/löysäämällä nilkan tarrasidettä. (Kuva 2)



Tuotteen hoito-ohjeet

Airheel™ voidaan pestä käsin pesussa haaleassa vedessä miedolla pesuaineella. Tuote tulee kuivattaa ilmassa tilassa poissa lämmönlähteen välittömästä läheisyydestä. Ei saa kuivattaa lämpöpatterin päällä. Ei saa laittaa pesukoneeseen tai kuivuriin.

Ilmanpaineen vaikutus (esim lentokoneessa oltaessa)

Ilmatyönyt laajenevat ilmanpaineen noustessa. Säädä ilmatyönyyn painetta kiristämällä tai löysäämällä nilkan tarrasidettä.