



taluair®

Käyttöohjeet

taluair®



taluair®

JOHDANTO

Funktionaalisilla ilmatyynylastoilla on saatu hyviä hoitotuloksia nilkan nivelsidevammojen ja nilkan nivelrikon kuntoutuksessa.

Lääkäri päättää kirurgisen tai konservatiivisen hoidon aloittamisesta tekemänsä diagnoosin perusteella. Päätöksestä riippumatta kokemukset ovat osoittaneet funktionaalisen kuntoutuksen immobilisaatiota tehokkaammaksi.

Ilmatyynylasta tukee nilkan nivelsiteitä sekä mediaali- että lateraalipuolelta (sisä- ja ulkopuoli) ja mahdollistaa sekä koukistus- että ojennusliikkeet. Näin nilkan normaali liikkuvuus säilyy.

Tukilastat on pehmustettu ilmatyynyillä, jotka estävät lastoja painamasta ihoa. Nilkan sisä- ja ulkosivulla on paksumpi pehmuste, joka lisää painetta tuettavan alueen alimmalle kolmannekselle. Paine on suurin alaosassa ja pienenee ylöspäin, mikä vähentää turvotusta nopeammin. Ilmatyynyissä on ihoystävällinen polyuretaanipäällinen ja PU-vaahdotäyte. Näitä materiaaleja käytetään yleisesti terveydenhuollossa. Tuote ei sisällä PVC:tä eikä pehmentimiä. Suosittelemme kuitenkin, että tuen alle puetaan imukykyinen sukka.

Anatomisesti muotoiltu **taluair®**-ilmatyynylasta on tehokas apuväline, joka on tarkoitettu tilapäiseen potilaskäyttöön funktionaalisessa kuntoutuksessa. Tuessa on kolme kokovaihtoehtoa sekä oikealle että vasemmalle nilkalle, millä varmistetaan yksilöllinen istuvuus.

INDIKAATIOT/KONTRAINDIKAATIOT

Hoitava lääkäri tekee hoitopäätöksen diagnoosinsa perusteella. **Taluair®**-tukea käytetään yleisesti nilkan nivelsidevammojen, nilkan vaikeiden venähdysten ja löystyneiden nivelsiteiden hoidossa sekä nilkkamurtumien ja nivelsiteiden re-

taluair®

peämien konservatiivisessa tai funktionaalisessa jälkihoidossa.

TUOTETURVALLISUUS

Taluair®-ilmatyynylasta täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/EEC perusvaatimukset. Tuotteessa on tämän direktiivin mukainen CE-merkintä.

TOIMITUSTIEDOT

Tilaamasi **taluair®**-tuki toimitetaan käyttövalmiina, asianmukaisin tuotemerkin nön varustettuna ja suojakartonkiin pakattuna. Mukana on käyttöohje. **Taluair®**-tukeen kuuluu hevosenkengän muotoinen ilmatyynylasta, 2 Velcro-kiristysnauhaa ja kantakappale. Tarkista, että kaikki tuotteen osat ovat mukana.

TURVAOHJEET

Noudata käyttöohjeita huolellisesti. Käytä **taluair®**-tuen alla imukykyisiä, puuvillasta valmistettuja sukkia. Älä käytä vaurioitunutta **taluair®**-tukea. Varmista, että tuki on säädetty oikein – lue Sovitusohjeet-kappale. Käytä vain oikean kokoista **taluair®**-tukea.



KOON VALINTA

TaluaiR®-tuessa on kolme kokovaihtoehtoa sekä oikealle että vasemmalle nilkalle. Ks. alla oleva taulukko. Kantaosaa säätämällä tukea voidaan säätää jalan leveyden ja tarvittaessa turvotuksen määrän mukaan.

Pituus	taluaiR koko	tuote nro
alle 158 cm	small-oikea	600S-R
	small-vasen	600S-L
158 cm -163 cm	medium-oikea	600M-R
	medium-vasen	600M-L
yli 163 cm	large-oikea	600L-R
	large-vasen	600L-L

SOVITUSOHJEET

Suosittellemme imukykyisten sukkien käyttöä. Tämä parantaa ilmankiertoa jalassa ja estää epämiellyttävää hikoilua.

TaluaiR®-tukea kiinnittäessäsi noudata alla olevaa 4 ohjetta. Näin varmistat **taluaiR**®-tuen asianmukaisen toiminnan.

VAIHE 1



Kantapään leveyden säätö: Nosta ilmatyynyjä alareunasta ja säädä kannan leveys sopivaksi. Kiinnitä Velcro-nauhoilla. Kanta-kappaleen tulee aina olla keskellä.

VAIHE 2



Kiristä alempi nauha ensin. Pane kenkä jalkaan ja kiristä kengännauhat.

VAIHE 3



Kiristä ylempi nauha. Varmista, että sivulastat ovat nilkkaa vasten sitä puristamatta. Lyhennä tarvittaessa Velcro-nauhoja leikkaamalla. Pyöristä nauhojen päät.

VAIHE 4



Kun poistat tuen, avaa vain Velcro-nauhat. Näin tuen säädöt säilyvät ennallaan.

HOITO-OHJEET

Tuote ei ole toimitettaessa steriili eikä se sovelly steriloitavaksi. Älä käytä emäksiä tai hankaavia puhdistusaineita. Tuen osia ei tarvitse huoltaa. Ne voidaan pestä 30 asteessa vedellä ja miedolla pesu- tai desinfiointiaineella. Desinfiointiainetta valitessasi tutustu desinfiointiaineen tuoteselosteeseen. **TaluaiR**® voidaan pyyhkiä kuivaksi tai kuivata huoneilmassa.

UUELLEENKÄYTTÖ

Suosittellemme, että samaa tuotetta käyttää vain yksi henkilö. Jos tuote siirretään toisen henkilön käyttöön, hoito-ohjeita tulee noudattaa huolellisesti. Puhdistuksen jälkeen hoitavan lääkärin tulee tarkastaa tuen kunto. Jos **taluaiR**®-tuessa havaitaan pienikin vaurio, tuki tulee poistaa käytöstä ja hävittää.

TUOTTEEN HÄVITYS

TaluaiR® on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, eikä se sisällä myrkyllisiä tai ympäristölle haitallisia aineosia. Jos tuote ei ole altistunut haitallisille bakteereille, se voidaan kierrättää. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tuotteen myyjään.

Valmistaja: Albrecht GmbH Saksa

Maahantuoja

Kir-Fix Oy

Eläntontie 5
01510 VANTAA
puh 010 400 6120
info@kir-fix.fi
www.kir-fix.fi

